



ECOSYM[®]
METHODE ADAMS

Optimale reiniging
voor gebitsprothesen

Optimale reiniging voor gebitsprothesen

Het basismateriaal van een kunstgebit is speciaal ontwikkeld om u een natuurgetrouw uiterlijk te geven en een zo groot mogelijk gebruiksgemak te bieden (bij eten, drinken, praten, lachen). En minstens zo belangrijk: een kunstgebit moet lang mee gaan! Toch kan het materiaal van een prothese door bepaalde reinigingsmiddelen aangetast worden. De schurende werking van tandpasta bijvoorbeeld maakt minuscule krasjes op het oppervlak van een prothese. Daardoor wordt deze ruw en kunnen vuil en bacteriën zich makkelijk hechten. Bacterie-opbouw kan weer leiden tot irritaties van het tandvlees en slechte adem. Om dit te voorkomen heeft Ecosym in samenwerking met Nederlandse tandprotheticici de optimale reinigingsmethode ontwikkeld.

Ecosym Forte & Ecosym box

Bij hardnekkige aanslag op uw prothese

Tandsteen, thee, rode wijn of nicotine is hardnekkige aanslag die niet altijd met de dagelijkse verzorging van uw prothese kan worden tegengegaan. Hiervoor heeft Ecosym een oplossing.

- 3-4 druppels Ecosym Forte in de Ecosym box
 - neem de prothese uit de mond en spoel deze af met lauw water
 - leg de afgespoelde prothese op het 'rooster' van de Ecosym box
 - vul de Ecosym box met lauw water tot de prothese geheel is ondergedompeld
 - laat de prothese op deze manier enkele uren of een nacht staan
 - neem het 'rooster' uit de box en spoel de prothese goed af met lauw water
 - poets uw gebit extra schoon met Ecosym Gel en de Ecosym gebitsborstel
 - spoel het rooster en de box voldoende uit met warm water
- N.B. de Ecosym box kan ook in de vaatwasser gereinigd worden



Ecosym Gel & Ecosym gebitsborstel

Voor de dagelijkse hygiëne van uw prothese

Zowel op als onder uw prothese blijven voedselresten achter. Als die niet worden verwijderd dan kunt u last krijgen van een slechte adem, maar ook kan uw tandvlees gaan ontsteken. Juist uw tandvlees is van groot belang voor de pasvorm van uw prothese. Ook hiervoor heeft Ecosym een oplossing.

- neem de prothese uit de mond en spoel deze af met lauw water
- doe enkele druppels Ecosym Gel op de prothese
- poets de prothese schoon met de Ecosym gebitsborstel
- spoel de prothese goed af met lauw water



Ecosym mondmassageborstel

Voor de gezondheid van uw mond

Masseer met de zachte Ecosym mondmassageborstel minstens één keer per dag uw tandvlees en het slijmvlies van uw kaken. Verminderde doorbloeding van de slijmvliezen kan ertoe leiden dat uw tandvlees gaat slinken. Dit laatste is direct van invloed op de pasvorm van uw gebit.



Meer informatie over Ecosym: www.ecosym.nl

Ecosym producten zijn verkrijgbaar bij de drogist en apotheek of bij de tandprotheticus met een verkooppunt.